

# IPL

libera dai peli superflui

## SCEGLI E LAVORA IN LIBERTÀ

- Libertà di impostare i parametri in autonomia
- Libertà di farsi guidare dall'apparecchiatura
- Libertà di intervenire in tempo reale



### L'APPARECCHIATURA A LUCE PULSATA SICURA E VERSATILE

I peli superflui non sono solo un fatto estetico, ma anche un fattore di disagio psicologico. Una persona afflitta da questa problematica si sente spesso limitata nel suo mondo relazionale. Per questo i trattamenti di epilazione sono tra i più richiesti. La tecnologia, in questo campo, ha subito un'evoluzione notevole e la luce pulsata è uno dei più efficaci sistemi di ultima generazione. Questa tecnologia utilizza spot di luce ad alta intensità (I.P.L.) e consente di ottenere buoni risultati in tempi più brevi.

## COME FUNZIONA?

Il sistema *élite Resolution I.P.L.* è la soluzione a luce pulsata di Overline per contrastare i peli superflui. Adatta a tutti i tipi di pelle e in qualsiasi parte del corpo, capace di lavorare anche nei punti più difficili e delicati come viso, ascelle e inguine. Sfruttando il principio della fototermodisi selettiva, genera una serie di flash luminosi che inibiscono le cellule responsabili dello sviluppo del pelo riducendone progressivamente la ricrescita.

cod. **2145**

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465

Filtri:  
 cod. 9134 RED  
 CORPO PELLE SCURA E ABBRONZATA 620 nm  
 cod. 9134 ORANGE  
 CORPO PELLE CHIARA 600 nm




Riduzioni:  
 cod. 9134 RED-R  
 VISO PELLE SCURA E ABBRONZATA 620 nm  
 cod. 9134 ORANGE-R  
 VISO PELLE CHIARA 600 nm



# EFFICACI SPOT

Lo spot di luce viene emesso da uno speciale manipolo, al quale possono essere applicate le riduzioni per lavorare sulle differenti zone del corpo. In dotazione all'apparecchiatura due filtri per la depilazione, uno rosso per le pelli scure o abbronzate e l'altro arancione per le pelli chiare. L'apparecchiatura ha un metodo di raffreddamento ad aria, per evitare che il calore emesso crei rossori.

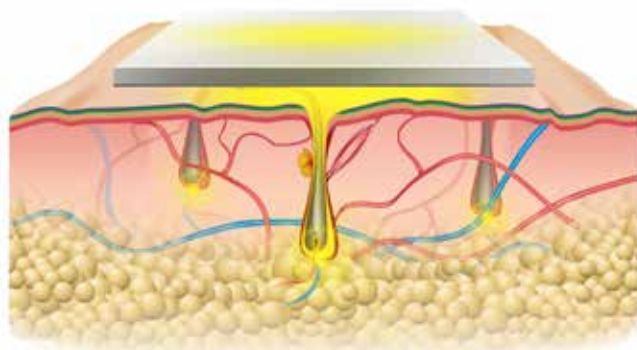

# COME E PERCHÈ

élite Resolution I.P.L. è dotata di un avanzatissimo software che rende il sistema molto versatile e intuitivo e permette di lavorare in piena libertà scegliendo tra la modalità di lavoro guidata o la possibilità di lavorare in autonomia. In entrambi i casi, se necessario, la tecnologia consente all'estetista di intervenire in tempo reale per modificare le specifiche del trattamento. Il monitor touch, la grafica e la visualizzazione delle immagini, i filmati demo e l'organizzazione dei comandi aumentano ulteriormente la semplicità di utilizzo.

# PRE-TRATTAMENTO

Prima di iniziare, è fondamentale programmare il lavoro in base alle esigenze e allo stato di salute del cliente, accertandosi che il soggetto non abbia assunto farmaci fotosensibilizzanti nelle ultime settimane, non abbia infiammazioni cutanee, ferite aperte, tatuaggi o un'eccessiva densità di nei nelle zone da trattare, non soffra di squilibri ormonali, non sia in stato di gravidanza o abbia patologie per cui la luce pulsata potrebbe risultare controindicata. Con élite Resolution I.P.L. ogni seduta può essere accuratamente personalizzata, perché l'apparecchiatura permette di impostare tutti i parametri necessari: individuare il fototipo della pelle, la dimensione e il colore dei peli del cliente e definire la potenza e la temperatura da esercitare, scegliendo anche il filtro (arancione per le pelli chiare e rosso per quelle scure) e il riduttore da utilizzare sul manipolo. L'apparecchiatura è dotata di un metodo di raffreddamento ad aria che evita che il calore emesso dalla luce crei rossori sull'epidermide. Tutte queste accortezze consentono di lavorare anche in zone particolarmente delicate, come viso, ascelle e inguine.

- Radere i peli del cliente con molta delicatezza
- Detergere la parte con *iSol Cleansing Soft Mousse*
- Indossare e fare indossare alla cliente gli appositi occhiali

# TOUCH SCREEN 10" LCD DISPLAY

## CAPILLARE CONSULTAZIONE DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI


Permette di visualizzare immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro garantendo una consultazione capillare dei trattamenti e di tutte le funzioni.



Impostazione del fototipo, del colore e della dimensione del pelo.



Schermata che indica la tipologia di filtro da utilizzare

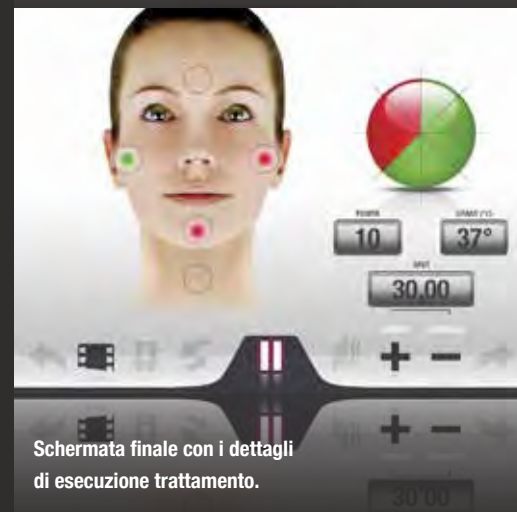

Schermata finale con i dettagli di esecuzione trattamento.

## ● TRATTAMENTO

Partendo da un lato, procedere lentamente avendo cura di far susseguire in modo corretto gli spot di luce. Il manipolo consente di trattare anche ampie parti del corpo. I flash luminosi generati, secondo il principio della fototermodisi selettiva, inibiscono le cellule responsabili dello sviluppo del pelo, riducendone la ricrescita. L'energia luminosa catturata dal pelo, e assorbita in modo diverso nelle varie zone a seconda della concentrazione di melanina, si trasforma in energia termica (calore) che determina la distruzione del bulbo pilifero.



## ● POST TRATTAMENTO

Al termine del trattamento la parte potrà risultare leggermente arrossata e per questo è utile applicare la crema **iSol IPL Calming Emulsion**, indicata per lenire, rinfrescare e idratare la parte.

I peli trattati sono quelli in fase di crescita (anagen), pertanto le sedute successive dovranno essere previste a non meno di un mese di distanza l'una dall'altra, in funzione della ricrescita. Il numero di sedute per poter ottenere una depilazione progressivamente definitiva, può variare di soggetto in soggetto. Tutti i dati vengono registrati sulla Memory card, una fedele scheda cliente che ricorda i trattamenti da effettuare.



SPECIAL BEAUTY

**ISO.FOAM.150 - 150ml**  
**CLEANSING**  
**SOFT MOUSSE**  
Detergente  
Dermocompatibile  
viso&corpo

**ISO.SCRUB.200 - 250ml**  
**JOJOBA FACE**  
**& BODY**  
**SCRUB**  
Scrub in gel ai  
microgranuli di Jojoba

# Esalta i benefici dei trattamenti IPL

**Cod. ISO.IPL.100 - 250ml**  
**IPL CALMING**  
**EMULSION**  
Emulsione lenitiva  
idratante post IPL



# IPL

## EpilationBag

cod. 2046

Dimensioni in mm L370 x P250 x H520

Con *IPL Epilation Bag* puoi usufruire delle capacità della **Luce Pulsata** anche fuori dal tuo istituto. Pratico, maneggevole e decisamente resistente agli urti, con *IPL Epilation Bag* sei professionale, sempre e ovunque.



## PERSONALIZZA L'APPARECCHIATURA OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

CON QUESTA APPARECCHIATURA ESISTONO 4 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:

